

SUPRATHEL® - Uygulama Kılavuzu



1



YARANIN TEMİZLENMESİ VE HAZIRLANMASI

SUPRATHEL uygulanmadan önce yara bölgesi yara yıkama veya steril solüsyonlar ile dikkatlice yıkanıp dezenfekte edilir. Daha sonrasında ise yara üzerindeki ölü dokuyu uzaklaştırmak için debridman yapılır.

Travma üzerinden 3 gün geçtikten sonra uygulamadan önce mutlaka Mekanik Debridman yapılmalı yada geçen süre zarfında farklı ajanlarla Otolitik veya Enzimatik debridman yapılarak sağlıklı dokuya ulaşıp uygulanmalıdır.

2



DEBRİDMAN YAPILMASI

İlk adımda, debridman steril bir kompres veya bezle kapiler kanama sağlanıncaya kadar yapılır. Kapiler kanamanın olması sağlıklı dokuya ulaşıldığını gösterir. Yeterli derecede veya hiç kanama sağlanamadığı durumlarda steril veya sterilize edilmiş paslanmaz çelik tel, sert sünger veya kanama sağlayıcı diğer sert malzemeler kullanılır.

3



DERİN DERMAL YANIKLARIN DEBRİDMANI

Derin dermal yanıklarda, dermal yapıya (sağlıklı dokuya) ulaşana kadar debridman yapılması gerekir. Bu debridman, El Dermatomu, Waterjet sistemleri veya Dermabrader vasıtasıyla yapılabilir. Bu işlemler uygulanırken geniş bölge kanamalarından kaçınmak gerekmektedir.

4



HEMOSTAZ

SUPRATHEL uygulamasından önce hemostazın sağlanması gerekmektedir.

Minör kanamalarda hemostaz adrenaline daldırılmış kompres, %1 epinefrin solüsyonu veya sıcak kompres uygulanarak sağlanabilir.

Geniş alan kanamalarında hemostaz bipolar diyatermi ile sağlanabilir.


5



SUPRATHEL'İN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

SUPRATHEL' i yeşil koruyucu kâğıdından çıkarın
SUPRATHEL deri benzeri beyaz ve opaktr. (Şeffaf değildir)
SUPRATHEL makas yardımıyla kesilerek şekillendirilir

6

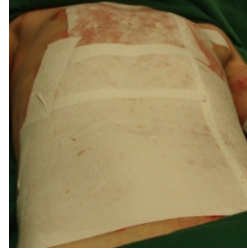

SUPRATHEL'İN UYGULANMASI

SUPRATHEL ile yara bölgesini yara kenarlarından 1cm taşacak şekilde tamamen kaplayın.

SUPRATHEL'in yarayla tam temas ettiğinden emin olun. Altında boşluk kalmamalı.

SUPRATHEL'i mekanik olarak sabitlemek gerekmez. SUPRATHEL yaraya stapler veya sütür kullanmadan yapışır. Ancak, göğüs duvarı gibi sabitlenmesi zor bölgelerde veya çocuklarda Suprathe'l'i parafinli tül üzerinden tek bir sütür ile sabitlemek mümkündür. SUPRATHEL uygulandıktan kısa bir süre sonra şeffaflaşır.

7



PARAFİNLİ TÜL VE KORUYUCU ÖRTÜ UYGULANMASI

SUPRATHEL'in yerinden kaymasını ve zarar görmesini engellemek için üstüne tek kat parafinli tül uygulayın. Parafinli tülün SUPRATHEL'i 2cm kadar geçmesine izin verin. SUPRATHEL ve parafinli tül yara iyileşene kadar yara üzerinde kalır.

Dış sargı olarak, SUPRATHEL'in en iyi şekilde sabitlenmesi için pamuk bandaj üzerine elastik bandaj ile hafif baskı uygulayarak sarın. Bu sargı, parafinli bez üzerine katlanmamış kompresler kullanılarak yapılabilir. Bu sayede sargıların değiştirilmesi çok daha kolay olur. Ellerde ise, ilk üç veya dört gün için "tenis raketi" veya "yumruk" bandajı kullanılması SUPRATHEL'in zarar görmesini önleyecektir.

8



İLK SARGI DEĞİŞİMLERİ / SUPRATHEL İLE İYİLEŞME SÜRECİ

İlk sargı değişimi, en erken 48 saat en geç 72 saat içinde yapılır. Steril gazlı bez ve bandajlar çıkarılır. Parafinli tül ve SUPRATHEL yara üzerinden çıkarılmaz.

Eğer SUPRATHEL yara üzerine yapışmışsa bu yaranın iyileşeceği anlamına gelmektedir.

İyileşme süreci SUPRATHEL ve parafinli tül üzerinden izlenebilir.

Epitelizasyon oluşumuyla beraber SUPRATHEL kendiliğinden ayrılır. SUPRATHEL'in kalkan kısımları makas yardımıyla kesilir.

SUPRATHEL ve parafinli tül kombinasyonunun üzeri yeniden steril gazlı bez ile sarılır.

SUPRATHEL ve parafinli tül yara üzerinde kalmak suretiyle, dış sargılar 3-6 günde bir değiştirilir ve iyileşme süreci takip edilir.

SUPRATHEL 14-21 gün sonra tamamen yaradan ayrılacaktır yada üst epitel tabakalarca emilerek kaybolacaktır.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

- Travma başlangıcından itibaren 72 saat içinde uygulanması tavsiye edilir.
- Travma üzerinden 3 gün geçtikten sonra uygulamadan önce mutlaka Agresif Mekanik Debridman veya Enzimatik Debridman yapılmalı ve sağlıklı dokuya ulaşıp uygulanmalıdır.
- Suprathe'l yapışabileceği sağlıklı bir dokuya ihtiyaç duyduğundan tamamen 3. derece olan alanlarda uygulanmaz. Ancak kenarlarında tutunabileceği sağlıklı bir doku varsa geniş olmayan 3. derece alanları da iyileştirir.
- Eskar, yüksek miktarda eksuda ve kanama varsa uygulanmadan önce gerekli prosedürler yapıp öyle uygulanmalıdır.
- Nekrotik yaralara ve enfekte yaralara uygulanmaz.

Üretici :

Polymedics Innovations GmbH

Heerweg 15 D 73770 Denkendorf / Almanya

<http://www.polymedics.de/en/home/>

Distribütör:

Lotus MDC

Tel: 0312 434 10 60

Web: www.lotusmdc.com